
## QuikRead go® Strep A






1 Entnehmen Sie den Rachenabstrich mit dem Abstrichtupfer und geben diese in das leere Extraktionsröhrchen. Zuerst 2 Tropfen der Reagenz 1 (farblos) zugeben, danach 2 Tropfen der Reagenz 2 (rot). Die Lösung färbt sich gelborange.



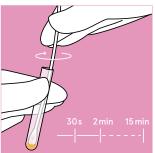

Den Abstrichtupfer mind. 30 Sek. in der Lösung quirlen und anschließend weitere 90 Sekunden. in der Lösung stehen lassen, aber nicht länger als 15 Min. Entfernen Sie die Abdeckfolie von der vorgefüllten Küvette. Achtung: Die Küvette nur in der oberen Hälfte anfassen.

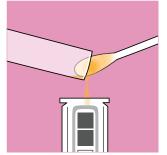




Geben sie -auch unter Zuhilfenahme des Abstrichtupfers- den kompletten Inhalt des Extraktionsröhrchen in die Küvette. Nutzen sie den Tupfer um die Flüssigkeiten gut zu vermischen (es erfolgt eine rote Einfärbung), drücken Sie dann den Tupfer innen am Rand der Küvette gut aus und entfernen ihn danach.





Die Küvette sorgfältig mit einem Strep A-Reagenzstopfen verschließen. Den pinken inneren Teils des Reagenzstopfens auf keinen Fall herunterdrücken. Sobald die Probe in die Küvette gegeben wurde, den Test innerhalb von 4 Stunden durchführen. Wählen Sie "Messen" auf dem Display des QuikRead go-Instruments.

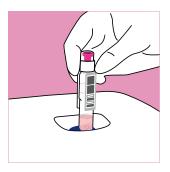



Küvette in das Küvettenfach einsetzen. Der Barcode muss nach vorne zeigen. Die Anzeige informiert über den Stand der Messung. Nach Abschluss der Messung wird das Ergebnis auf dem Display angezeigt und die Küvette fährt automatisch aus dem Küvettenfach zur Entnahme heraus.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie einen Test durchführen.

## QuikRead go® Strep A



## Wichtige Hinweise zur Testdurchführung und Probennahme

Bei der Durchführung des Tests ist es wichtig, den Tupfer während der Extraktion in dem Extraktionsröhrchen Küvette zu belassen und in der Küvette gut zu durchmischen. Denken Sie daran, ihn beim Herausnehmen aus der Küvette gegen die Innenwand fest auszudrücken.




Positionieren Sie alles, was Sie zur Entnahme des Rachenabstriches brauchen, in die unmittelbare Nähe zum Patienten: QuikRead go Strep A Abstrichtuper, Zungenspatel und das QuikRead go Strep A Extraktionsröhrchen. Tragen Sie Schutzkleidung incl. Handschuhen. Benutzen Sie ausschließlich die im Kit enthaltenen QuikRead go Abstrichtupfer. Andere Tupfer können das Ergebnis verfälschen, sowohl positiv als auch negativ.



Nehmen Sie den Rachenbstrich mit dem beiliegenden Tupfer. Reiben Sie den Abstrichtupfer an beiden Rachenmandeln. Und nur dort. Eine falsche Probennahme kann ein falschnegatives Ergebnis hervorbringen. Ebenso, wenn zu viel Speichel oder Keime aus anderen Bereichen des Mundes aufgenommen werden, kann ein falsches Ergebnis herauskommen.



2 Entfernen Sie die sterile Verpackung vom Abstrichtupfer. Bitten Sie den Patienten, den Mund zu öffnen. Drücken Sie mit dem Spatel die Zunge nach unten, bevor Sie beginnen, den Abstrich zu nehmen.

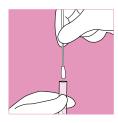

A Nehmen Sie den Abstrichtupfer vorsichtig aus dem Mund und achten Sie darauf, keine weiteren Bereiche im Mund zu berühren, um eine Kontamination zu verhindern.

Achten Sie auf eine korrekte Probennahme. Beachten Sie die Farbwechsel, sie zeigen den korrekten pH-Wert an bei der Entnahme und bei der Neutralisation. Beachten Sie die zeitlichen Vorgaben.

## Kontaktinformationen

Aidian Germany GmbH

info@aidian.de 06196-77 00 146

Bestellung en: bestellung@aidian.de

www.aidian.de / www.quikread.com

Produkt	ArtNr.
QuikRead go Strep A	135883
QuikRead go Instrument	133893
QuikRead go Strep A swabs	153212